

Kurzanleitung für den neuen Test


Produkt: Clinitest® rapid COVID-19 Antigentest Hersteller: Siemens Healthineers

Erste Schritte

(wird von der Lehrkraft durchgeführt)

1


Röhrchen in eine Halterung stellen (z. B. Klammer)



2

10 Tropfen (0,3 ml) Pufferlösung einfüllen

10 x

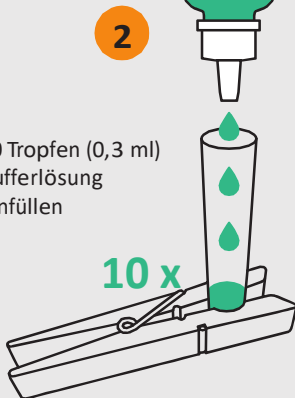


Probennahme

3

Tupfer in **beide Nasenlöcher** ca. 2–4 cm einführen, fünfmal drehen und dabei an der Nasenwand entlangführen.

5 x

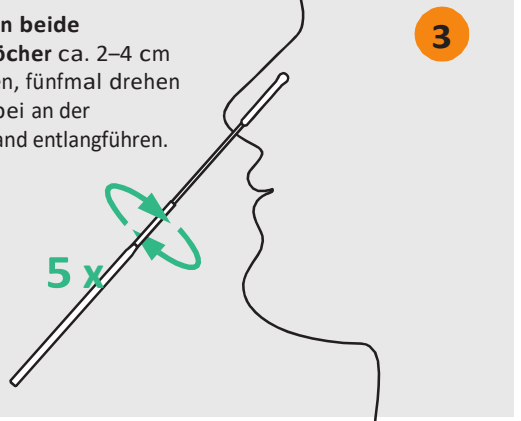


Behandlung der Probe

4

mind. **6 x**


Tupfer einführen und mindestens sechsmal drehen und gegen die Seiten des Röhrchens drücken

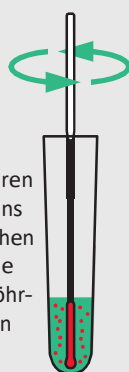

5


Tupfer **eine Minute** im Röhrchen stehenlassen

Röhrchen mehrmals gegen Tupfer zusammendrücken!

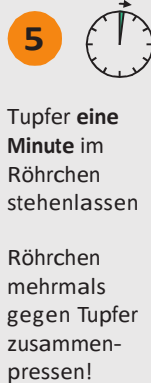


6

Tupfer entnehmen und Tropfkappe fest aufsetzen

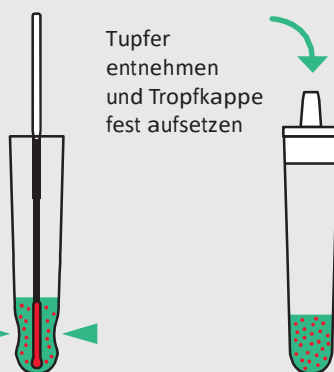

7


Vier Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben

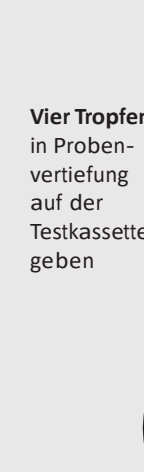

8


Ergebnis **nach 15 min** ablesen

4 x

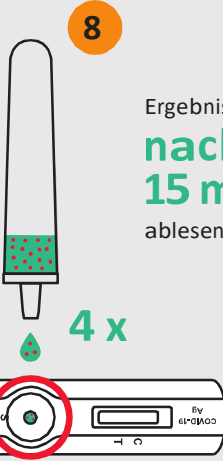


9

Nach mehr als 20 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!



Auswertung der Ergebnisse

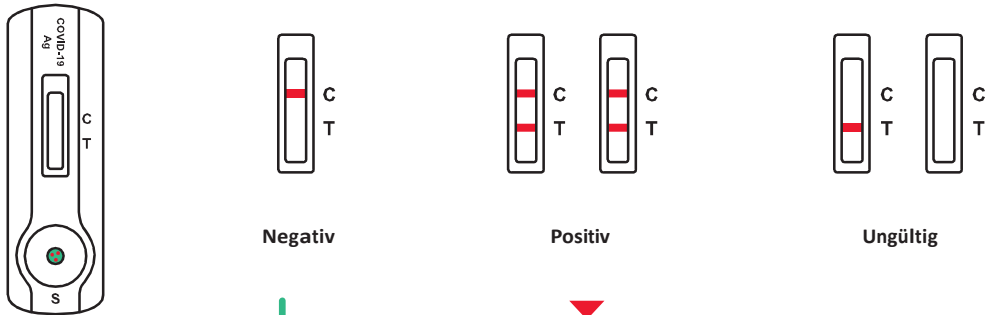

Negativ

Schüler/-innen sowie Personal kann in der Schule bleiben

Positiv

Kind/Personal muss umgehend nach Hause und z.B. vom Hausarzt PCR-Testung durchführen lassen

Ungültig

Test wiederholen!

Entsorgung



Verwendete Testteile in die Mülltüte werfen